

## KANKAINEN KASVOMASKI

Tuote- ja käyttötiedot kasvomaskin käyttäjälle

### TUOTETIEDOT

Materiaali 100% puuvilla/100% polypropyleeni.

Kahden puuvillakerroksen välissä Spunbond PP kuitukangas.

Kuminauhakiinnityksellä korvien taakse, (Kuminauhat voi tarvittaessa vaihtaa).

Pesu vähintään 60°C asteessa.

### KÄYTTÖTIEDOT

Yleiset tiedot:

Kankainen kasvomaski ei ole hengityksensuojain, eikä anna suojaa koronavirusta vastaan, mutta voi estää oikein käytettynä virusta kantavaa ihmistä tartuttamasta muita. Kankaista kasvomaskia voi käyttää paikoissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Noudata hengitystieinfektio-oireisena "THL:n kotihoito-ohjetta".

Noudata aina tärkeimpiä torjuntatoimia:

- hyvä käsihygienia, hyvä yskimishygienia,
- fyysisten tai lähikontaktien välttäminen,
- kasvojen, nenän ja suun koskettelun välttäminen

Maskin käyttö:

1. Pese kädet, ennen kuin puetaan maskin.
2. Älä koske kasvomaskiin, kun se on ylläsi.
3. Älä poista ja laita maskia päälle edestakaisin.
4. Jos kosket maskin pintaan käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi.
5. Riisu maski ottamalla vain sen kiinnitysnauhoista kiinni. Älä koske maskin ulkopintaan.
6. Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.
7. Varaa mukaan vaihtomaski ja muovipussi käytetyille maskille.
8. Pese maski käytön jälkeen vähintään 60°C asteen pesuohjelmalla, anna kuivua hyvin. Silitä tarvittaessa 150°C asteella (älä silitä kuminauhoja).

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

LÄHDE: Työterveyslaitos, Korona ja työ -verkkosivut

<https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus>

<https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskaista>